

MEDISLIPPER 1000

NUOVO MODELLO 2016, L'INNOVAZIONE CONTINUA



PER LA RIABILITAZIONE
VELOCE ED EFFICACE
DEI TRAUMI DISTORSIVI
DELLA CAVIGLIA.

- CIRCONDUZIONE TIBIOTARSICA
- **NEW:** VELOCITÀ ANGOLARE DI LAVORO
- **NEW:** SENSORI DI FORZA



MASSIMA FLESSIBILITÀ PER ALTE PERFORMANCE TERAPEUTICHE PERSONALIZZATE

LE LESIONI DELLA CAVIGLIA SONO TRAUMI MOLTO FREQUENTI ED HANNO UNA INCIDENZA PIÙ ELEVATA NEI PRATICANTI ATTIVITÀ SPORTIVE.

FAI LA DIFFERENZA INSERENDO MEDISLIPPER 1000 ALL'INTERNO DEL TUO CIRCUITO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA COME STRUMENTO INNOVATIVO PER IL RECUPERO MULTIFUNZIONALE DELLA TIBIO- TARSICA.



**MEDISLIPPER 1000 PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AMBITO TRAUMATOLOGICO,
MEDICO-SPORTIVO E NEUROLOGICO.**

MEDISLIPPER 1000


TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVA

MEDISLIPPER 1000 è un'apparecchiatura tecnologicamente innovativa, unica nel suo genere e specifica per l'allenamento muscolare e la riabilitazione della caviglia in ambito **traumatologico, medico-sportivo e neurologico**. Permette un efficace recupero del range articolare e della **propriocezione** della tibio-tarsica in tutte quelle situazioni che ne determinano ipomobilità.

A SECONDA DELLE ESIGENZE, MEDISLIPPER 1000 PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN MODALITÀ ATTIVA E/O PASSIVA CON RESISTENZE E VELOCITÀ VARIABILI. PERMETTE QUINDI DI PERSONALIZZARE IL TRATTAMENTO IN BASE ALLA SITUAZIONE DEL PAZIENTE ED OTTIMIZZARE IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA TIBIOTARSICA E DELL'ARTO INFERIORE.

MEDISLIPPER 1000

PERMETTE IL RECUPERO DEI SEGUENTI MOVIMENTI:

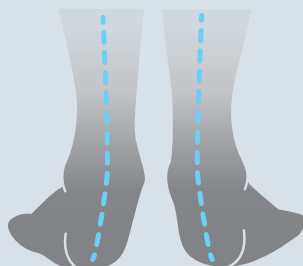

Valgizzazione



Flessione dorsale




Flessione plantare




Supinazione




Pronazione

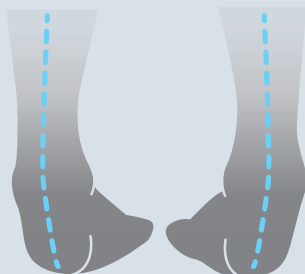

Varizzazione

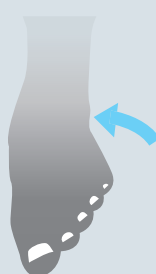

Eversione

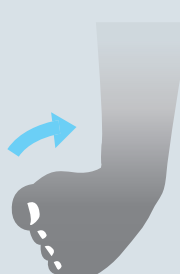

Inversione



Adduzione



Adbuzione

NUOVA MEDISLIPPER 1000



NUOVA TECNOLOGIA
PER UN RECUPERO
VELOCE E OTTIMALE



COME FUNZIONA MEDISLIPPER 1000 ?

MEDISLIPPER 1000 introduce la possibilità di stimolare i meccanocettori ed i propriocettori, determinando una rapida attivazione muscolare in ogni circostanza. Modificando l'escursione articolare e la velocità di movimento, è possibile agire sui movimenti complessi della caviglia permettendo di ottenere risultati eccezionali.

MEDISLIPPER 1000 permette un **recupero ottimale grazie alla modalità di esecuzione PASSIVA e ATTIVA** ed alla possibilità di agire su diversi parametri come la velocità del movimento, l'escursione articolare e la resistenza opposta.



SCOPRI L'INNOVAZIONE MEDISLIPPER 1000

MEDISLIPPER 1000 è la nuova tecnologia applicata all'apparecchiatura che permette il recupero in seguito a:

TRAUMI DISTORSIVI

con interessamento
capsulo legamentoso

CONTUSIONI ARTICOLARI

FRATTURE

DISTRAZIONI MUSCOLARI



RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA E NEUROMOTORIA

L'EVOLUZIONE DI **MEDISLIPPER 1000**


NUOVO MODELLO 2016 DOTATO DI INNOVATIVE FUNZIONALITÀ:



● FORZA NEL TEMPO

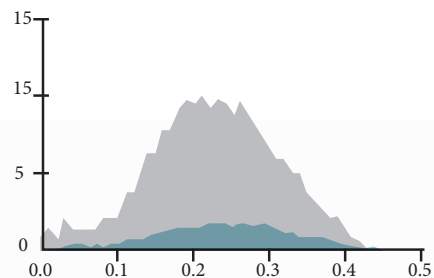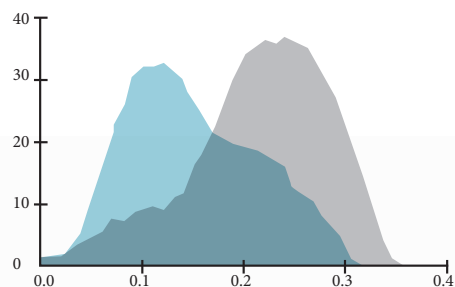

● VELOCITÀ ANGOLARE

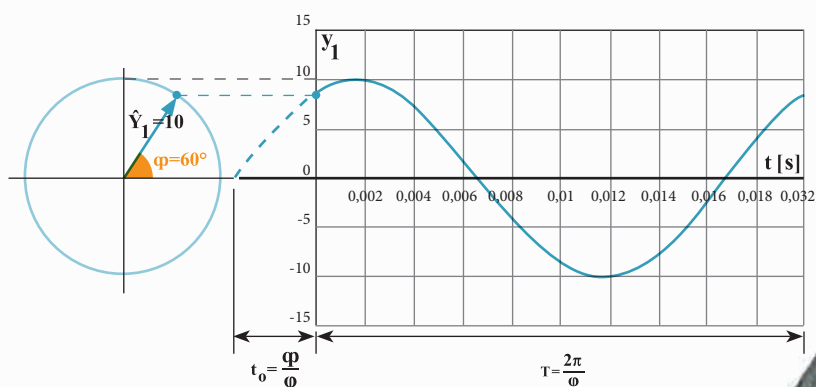


FASI DI LAVORO

MEDISLIPPER 1000

FASE DI LAVORO ATTIVA: STABILIZZAZIONE DINAMICA

Nella Modalità **ATTIVA** è il paziente stesso ad attivare il movimento di circonduzione precedentemente impostato dal terapeuta. Con questa modalità di può ottenere una **STABILIZZAZIONE DINAMICA** sulla componente muscolare (azione coordinata) ed una efficace stimolazione propriocettiva.

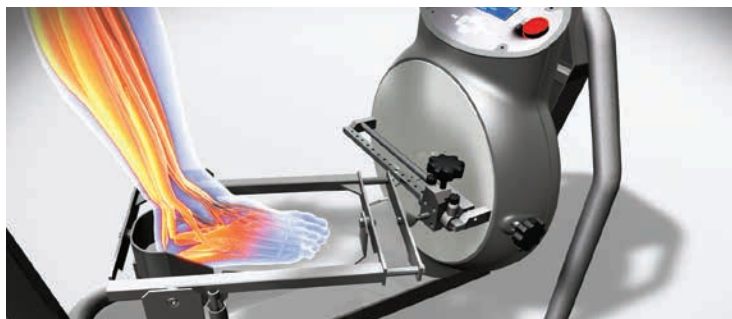

FASE DI LAVORO PASSIVA: STABILIZZAZIONE STATICA

Nella Modalità **PASSIVA** si induce il movimento tramite una specifica funzione elettronica e si può quindi effettuare una **STABILIZZAZIONE STATICA** su ossa e legamenti nonché una **MOBILIZZAZIONE PASSIVA** e una **STIMOLAZIONE PROPRIOCETTIVA**.



VALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO

Grazie agli appositi **SENSORI DI FORZA** è possibile monitorare la velocità angolare dell'esercizio attivo (giri per secondo) e la Forza impressa (Newton). Questa funzionalità permette quindi al terapeuta di verificare l'effettivo miglioramento del paziente a seguito del trattamento riabilitativo o di allenamento effettuato.

COME SI UTILIZZA MEDISLIPPER 1000 ?


POSIZIONE PIEDE

Posizionare il piede del paziente nell'apposito alloggiamento e bloccarlo con le fasce in dotazione, incrociandole intorno al piede come visualizzato qui sotto (1, 2 e 3).



SGABELLO

Utilizzare uno sgabello con regolatore dell'altezza modificato per poter gestire le varie tipologie di pazienti (57/70 cm).

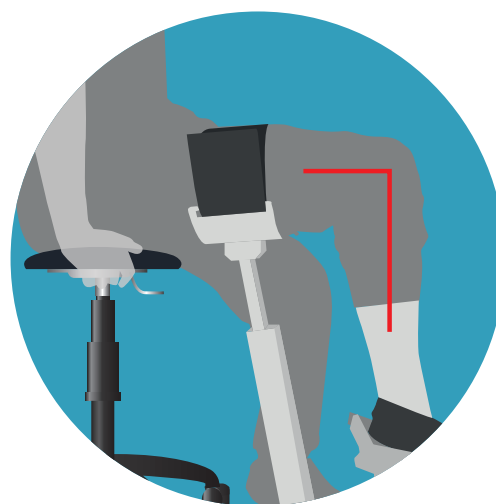

POSIZIONE PER ESERCIZIO

Per lo svolgimento corretto degli esercizi, posizionare la gamba del paziente come evidenziato nella foto.

DATI TECNICI

MEDISLIPPER 1000

Alimentazione:	220/230 V $\approx$ 50/60 Hz
Potenza massima assorbita:	150 Watt
Direttiva EMI:	EN 60601-1-2
Peso massimo del paziente:	110 kg



GRAZIE A
MEDISLIPPER 1000
È POSSIBILE OTTENERE
RISULTATI ECCEZIONALI IN
AMBITO TRAUMATOLOGICO,
MEDICO E SPORTIVO.



CARATTERISTICHE MEDISLIPPER 1000





Vuoi saperne di più su Medislipper 1000?

CONTATTA il nostro ufficio commerciale
I nostri operatori risponderanno alle tue domande.

RICHIEDI un preventivo gratuito e senza impegno
scrivendo all'indirizzo:
info@medisport.it

RICHIEDI informazioni anche dall'estero
scrivendo all'indirizzo:
export@medisport.it

L'ESPERTO RISPONDE alle tue domande
scrivi all'indirizzo:
expert@medisport.it

GUARDA le nostre referenze scientifiche sul nostro sito
www.medisport.it

Medisport S.r.l.
via Acque Alte 23
04010 Borgo Podgora (Latina) - Italy
Tel: +39 0773 636100
Fax: +39 0773 636002
www.medisport.it
info@medisport.it
<http://www.medislipper-medisport.com>
<http://store.medisport.it>